

Il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto DigniCap®

La chemioterapia può eliminare il tuo cancro, ma non deve distruggere i tuoi capelli.



Per
uomini e
donne con
tumore
solido

DIGNICAP®
La perdita di capelli non è più inevitabile

La perdita di capelli è un effetto collaterale comune a molti farmaci chemioterapici. I farmaci citostatici somministrati durante la chemioterapia non solo eliminano possibili cellule tumorali rimaste, ma hanno anche un impatto su tutto il corpo. Di conseguenza, il farmaco agisce su tutto il corpo e non solo sulle cellule tumorali. Le cellule che crescono in modo particolarmente rapido, come i follicoli piliferi, sono colpite dagli effetti inibitori che i farmaci citostatici hanno sulla crescita. Questo può portare alla perdita dei capelli.

Il sistema di trattamento a freddo del cuoio capelluto DigniCap riduce le probabilità di perdita dei capelli indotta da alcuni tipi di chemioterapia negli uomini e nelle donne colpiti da tumori solidi come quelli associati al seno, alla prostata, alle ovaie, all'utero, e ad altri tessuti.



DigniCap – Il primo sistema di raffreddamento del cuoio capelluto approvato dalla FDA



«Sono riuscita a mantenere i miei capelli e ho potuto scegliere di rimanere più riservata circa la mia battaglia contro il cancro. Assomigliavo ancora a me stessa.»

– Donna

COS'È IL RAFFREDDAMENTO DEL CUIO CAPELLUTO?

Il raffreddamento del cuoio capelluto è un metodo collaudato per ridurre l'alopecia indotta dalla chemioterapia, utilizzato con successo da migliaia di pazienti in tutto il mondo da diversi decenni. Durante questo trattamento, il cuoio capelluto viene raffreddato allo stesso tempo in cui vengono somministrati i farmaci citostatici.

COME FUNZIONA IL RAFFREDDAMENTO DEL CUIO CAPELLUTO?


Durante il raffreddamento del cuoio capelluto si verificano due reazioni fisiologiche:

1 Flusso sanguigno ridotto

Il raffreddamento causa il restringimento dei vasi capillari nel cuoio capelluto, così riducendo la quantità di farmaco che raggiunge i follicoli.

2 Assorbimento minore


Quando la temperatura del cuoio capelluto viene abbassata, i follicoli assorbono meno farmaco.

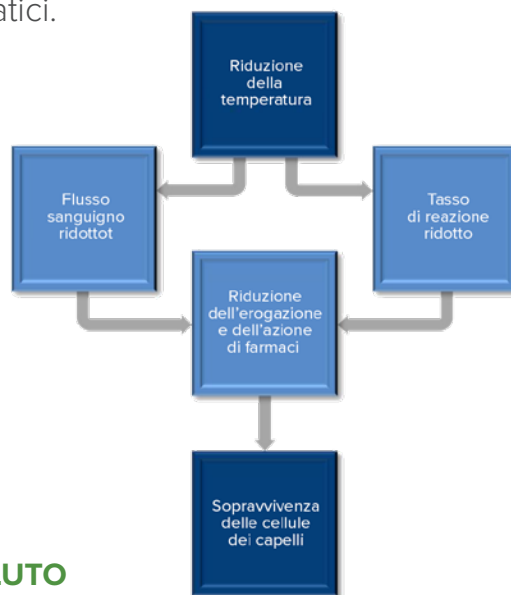

PERCHÈ IL RAFFREDDAMENTO DEL CUIO CAPELLUTO È IMPORTANTE?

I capelli di un paziente possono rappresentare una parte importante della sua identità e molti di loro ne considerano la perdita come uno dei più devastanti effetti collaterali della chemioterapia. La perdita dei capelli indotta dalla chemioterapia è un promemoria sgradito della malattia, che può influenzare negativamente l'immagine di sé, la fiducia, il senso generale di benessere e l'atteggiamento del paziente nei confronti del trattamento.

La perdita di capelli non è più inevitabile. Il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto DigniCap è un approccio collaudato per ridurre l'alopecia indotta dalla chemioterapia, aiutando i pazienti a mantenere la privacy, l'autostima e il controllo durante un periodo cruciale del trattamento.

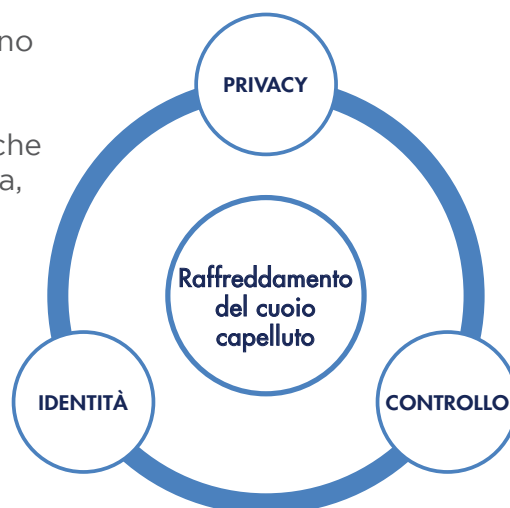


COSA ASPETTARSI DURANTE IL TRATTAMENTO CON DIGNICAP?

DigniCap sarà usato ad ogni ciclo di chemioterapia, il giorno della somministrazione.

La cuffia è collegata all'unità di raffreddamento e controllo, quindi è necessario essere collegati al sistema durante il trattamento. Il medico può scollegare la cuffia dal sistema per recarsi rapidamente in bagno. Durante la pausa, la cuffia di raffreddamento e la cuffia esterna in neoprene rimangono sulla testa.

Ciclo di trattamento DigniCap

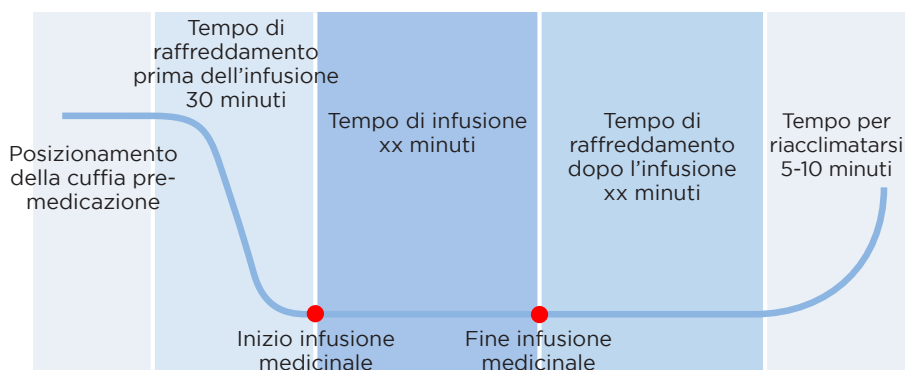


Come mostrato nella tabella, vi è un periodo di raffreddamento pre-infusione di 30 minuti. Dopo aver completato l'infusione, l'agente chemioterapico è ancora attivo nel sangue. Il trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto continuerà per un ciclo di raffreddamento post-infusione, che in genere dura 60-150 minuti a seconda del farmaco chemioterapico e della dose.

IL RAFFREDDAMENTO DEL CUOIO CAPELLUTO È LA SOLUZIONE GIUSTA PER ME?

Il raffreddamento del cuoio capelluto non previene completamente la caduta di capelli indotta dalla chemioterapia. Si potrebbe verificare una caduta di capelli nei pazienti, soprattutto dopo il primo o il secondo trattamento. Ciò non indica necessariamente un insuccesso del trattamento per il raffreddamento del cuoio capelluto. In generale, la perdita di capelli si riduce durante la continuazione del trattamento di raffreddamento nei cicli successivi di chemioterapia, e in alcuni pazienti si verifica persino una ricrescita.

I pazienti possono decidere di interrompere il trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto in qualsiasi momento. Tuttavia, i benefici di questo trattamento cesseranno con l'interruzione dello stesso.

- Si noti che il raffreddamento del cuoio capelluto può causare malessere per via del freddo estremo, ma in genere diminuisce entro i primi 30 minuti.
- Ci sono raccomandazioni particolari relativamente alla cura dei capelli durante i trattamenti di raffreddamento del cuoio capelluto.
- Il raffreddamento del cuoio capelluto richiede tempo aggiuntivo dopo l'infusione chemioterapica (60-150 minuti).
- Durante il trattamento si verificherà una caduta dei capelli. La quantità dipende da vari fattori, compreso il protocollo di chemioterapia, il dosaggio, la durata dell'infusione, il metabolismo del farmaco e altre condizioni mediche.
- Consultare le controindicazioni e le avvertenze DigniCap all'indirizzo DigniCapGlobal.com/contraindications.

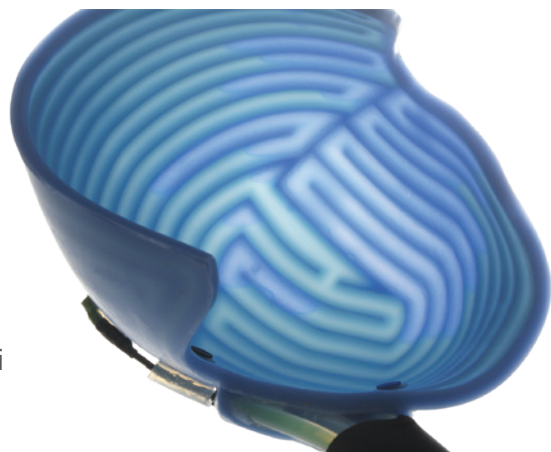

RISORSE

Consultare il sito **DigniCapGlobal.com** per le

- Risorse e video per il paziente
- Raccomandazioni per la cura dei capelli
- Dati dello studio clinico
- Considerazioni e avvertenze
- FAQ

RICERCA CLINICA

In una serie di studi eseguiti a livello mondiale, sono stati monitorati più di 1000 pazienti che hanno scelto di utilizzare DigniCap.

Nel 2015, dopo una rigorosa revisione da parte della FDA, DigniCap è stato il primo sistema di raffreddamento del cuoio capelluto a essere autorizzato negli Stati Uniti. Nello studio pilota condotto negli Stati Uniti, si è concluso che il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto DigniCap ha prevenuto la perdita di capelli nel 66,3% dei pazienti con tumore al seno trattato con chemioterapia adiuvante, rispetto a un gruppo di controllo in cui tutti i pazienti presentavano una significativa perdita di capelli. Il trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto è stato ben tollerato e non sono state osservate metastasi del cuoio capelluto, come pubblicato in JAMA febbraio 2017.

Il risultato dipende da vari fattori, compreso il protocollo di chemioterapia, il dosaggio, la durata dell'infusione, il metabolismo del farmaco e altre condizioni mediche.

Per ulteriori ricerche cliniche, visitare DigniCapGlobal.com/research.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DURANTE IL RAFFREDDAMENTO DEL CUOIO CAPELLUTO

I mal di testa che persistono durante l'infusione chemioterapica, o i mal di testa che si verificano dopo il raffreddamento del cuoio capelluto potrebbero essere causati dalla chemioterapia stessa. I mal di testa sono un effetto collaterale noto di alcuni farmaci citostatici.

Il mal di testa o una sensazione di pressione nella testa potrebbe presentarsi durante la fase di pre-raffreddamento e solitamente svanisce una volta raggiunta la temperatura del trattamento. Consultare il proprio oncologo se il mal di testa persiste.

Gli effetti collaterali possono includere:

- sentire freddo durante il trattamento di raffreddamento
- prurito o dolore al cuoio capelluto
- sensazione di pesantezza della testa
- vertigini
- mal di collo
- claustrofobia

Tutti gli effetti collaterali sono temporanei.

«Desideravo semplicemente che i miei amici e la mia famiglia mi trattassero 'normalmente' durante il periodo in cui mi sono sottoposta al devastante trattamento per la cura del cancro,... e credo sinceramente che mi abbia aiutato a riprendermi molto più velocemente.»

— Susan





«Chi mi vede non sospetta lontanamente che ho avuto un tumore... Quando i malati di cancro perdono i capelli, ciò influenza notevolmente il modo in cui la gente li tratta.»

– Allen

«Dopo 4 cicli di doxorubicina/Cytosan e 12 di Paclitaxel in 135 giorni, ho finito la chemio e mantenuto i miei capelli grazie a DigniCap.»

– Monika

Prima della chemio Giorno 55



Giorno 70



Giorno 100



Dopo la chemioterapia con DigniCap



DIGNICAP®

La perdita di capelli non è più inevitabile

www.DigniCapGlobal.com

PRO 20181122-01-IT

DigniCap® è un prodotto di Dignitana AB, un'azienda quotata svedese per la produzione di apparecchiature mediche. DigniCap è un sistema brevettato di raffreddamento del cuoio capelluto che offre a uomini e donne con tumori solidi la possibilità di mantenere i loro capelli durante la chemioterapia. DigniCap fornisce al paziente un raffreddamento continuo del cuoio capelluto di grande efficacia, sicurezza e livelli di comfort accettabili. L'azienda è il primo fornitore di tecnologie di raffreddamento del cuoio capelluto autorizzato dalla FDA. Dignitana, DigniCap, DigniCard, DigniCool, DigniStick, DigniTherm e DigniLife sono marchi commerciali di Dignitana AB (società per azioni). Dignitana, DigniCap e DigniLife sono marchi commerciali registrati di proprietà di Dignitana AB (società per azioni). La società è certificata ISO 13485 e DigniCap è certificata CE come dispositivo medico di Classe IIa.